


Измерванията се взимат сутрин преди ставане от леглото!

В зависимост от вида чорап трябва да измерите следните обиколки:

- cB - обиколката на глезена в най-тесната му част.
- cC - обиколка на прасеца в най - широката му част.
- cG - обиколка в края на бедрото (ингвинална гънка).

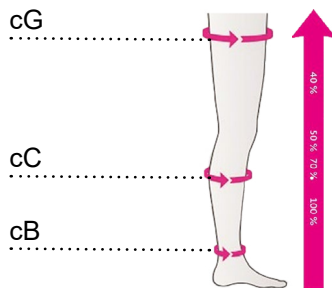

Градуираните компресивни чорапи подобряват циркулацията на кръвта във вените, която достига до сърцето. Най-голям натиск оказват върху глезена, а нагоре към бедрото компресията постепенно намалява. По този начин предотвратяват появата на рани и отоци.

Степен на компресия	Показания	Модели компресивни чорапи - medi
CCL 1: Лека Компресия 18 - 21 mmHg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Варикозни вени с лек оток, умора и тежест в краката ▶ Профилактика на хронична венозна недостатъчност без значима предпоставка за едем (оток) ▶ Ранни варикози при бременни ▶ Профилактика на тромбози ▶ Профилактика при продължително пътуване 	duomed mediven sheer & soft mediven elegance mediven active mediven for men thrombexin 18
CCL 2: Умерена компресия 23 - 32 mmHg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ При по-изразени симптоми ▶ Хронична венозна недостатъчност ▶ Варикоза с оток на крайника ▶ Посттравматичен оток ▶ След тромбофлебит ▶ За стабилизиране на резултатите от склеротерапия и варицектомия ▶ Варикози по-време на бременност с лек оток 	duomed struva 23 mediven sheer & soft mediven elegance mediven active mediven forte
CCL 3: Силна компресия 34 - 46 mmHg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Значително предразположение към отоци ▶ Вторична варикоза ▶ Обратим лимфедем ▶ Изразени варикозни вени със значителен оток ▶ Напреднала хронична венозна недостатъчност 	struva 35 mediven forte mediven plus
CCL 4: Много Силна компресия Над 49 mmHg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Лимфедем и елефантиаза ▶ Тежък посттромботичен синдром 	mediven 550 justafit essential

Абсолютни противопоказания: Напреднала периферна артериална недостатъчност, декопенсирана сърдечна недостатъчност, септичен флебит, phlegmasia coerulea dolens;
Относителни противопоказания: инфектирани дерматози, непоносимост към материалите, от които са произведени еластичните чорапи, сериозно нарушение на крайника, напреднала периферна невропатия, първичен хроничен артрит.